

Hygieneplan für:

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Wer? | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|--|
| Händedesinfektion | Vor und nach einer Schulung, auch bei der Verwendung von Schutzhandschuhen. Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material (u. a. Luftwegesystem) oder der Aufbereitung des Demonstrations- und Übungsmaterial | Desinfektionsmittel 30 Sekunden lang gut in die trockenen Hände einreiben. | Händedesinfektionsmittel, Name: _____ Konzentriert, Einwirkzeit 30 Sekunden | Lehrkraft, Personal zur Aufbereitung des Demonstrations- und Übungsmaterials | |
| Händereinigung | Bei sichtbaren Verschmutzungen oder nach der Schulung bzw. Pause. Nach einem Toilettengang oder vor der Aufnahme von Genuss- und Lebensmittel | Waschlotion aus dem Spender auf den feuchten Händen aufschäumen. Hände im Anschluss ordentlich mit Wasser abspülen und mit Einmalhandtüchern gründlich abtrocknen. | Waschlotion: Name: _____ | Lehrkraft, Personal zur Aufbereitung des Demonstrations- und Übungsmaterials, sowie Teilnehmer. | |
| Hautschutz | | ... | ... | ... | |
| Phantome zur Übung der Herz-Lungen-Wiederbelebung | Nach der Schulung oder bei sichtbarer Verschmutzung der Brusthaut bzw. des Gesichts- und Kopfbereiches. | Einmalhandschuhe anziehen und Desinfektionstuch aus der Verpackung/ Spender entnehmen, um den Bereich ordentlich abzureiben. | Flächendesinfektionsmittel, Name: _____ Konzentriert, Einwirkzeit ___ Sekunden | Lehrkraft, Personal zur Aufbereitung des Demonstrations- und Übungsmaterials | Desinfektion entsprechend in Anlage ____ dokumentieren |
| Luftwegesystem der Phantome zur Übung der Herz-Lungen-Wiederbelebung | Am Ende einer Schulung oder nach Verschmutzung während des Gebrauchs. | Einmalhandschuhe anziehen und Luftwegesystem nach Herstellerangaben tauschen. | -/- | Lehrkraft, Personal zur Aufbereitung des Demonstrations- und Übungsmaterials | Entsorgung über den Restmüll |
| Gesichtsmasken für Phantome zur Übung der Herz-Lungen-Wiederbelebung | Am Ende einer Schulung oder nach Verschmutzung während des Gebrauchs. | Gesichtsmasken von Adapter trennen und luftblasenfrei einlegen. Ggf. mit Bürste Verunreinigungen entfernen. Einwirkzeit einhalten und im Anschluss ordentlich mit Wasser abspülen. | Flächendesinfektionsmittel, Name: _____ Konzentrat: ____ % Einwirkzeit: ____ Minuten | Lehrkraft, Personal zur Aufbereitung des Demonstrations- und Übungsmaterials | Desinfektion entsprechend in Anlage ____ dokumentieren |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |